

PLATINUM ORANGE PRINT

ALGINAAT

Mixing time: 35 sec
Working time: 1min20sec
Setting time: 1min30sec

Opmerkingen:
Deze afdruk is tot 6 dagen
na afdrukken uit te gieten,
mits goed bewaard

Kenmerken:
Smaak; sinaasappel fruit
Dust free
Lood en cadmium vrij
Kleur; oranje
Goede consistentie



PLATINUM LICHTUITHARDENDE PLATEN

Platinum lichtuithardende platen verkrijgbaar in rose en transparant.

Platinum lichtuithardende platen zijn eenvoudig
te modelleren en zijn geschikt voor:

- individuele lepels (voor de betande en gedeeltelijk betande kaak)
- functie lepels (voor de onbetande kaak)
- als basis voor stiften
- als basis voor beetmodellen en registratiehulp



PLATINUM ADHESIEF



Universeel adhesief te
gebruiken bij zowel additieviny
als condensatiesiliconen en
bij alle soorten afdruklepels

PLATINUM ADHESIEF GENERATIE II



PLATINUM siliconen adhesief zorgt
voor een goede adhesie tussen de extra
uithardende of condensatie uithardende
siliconen en de individuele lepelplaten.

PLATINUM DUPLICEERGEL



Platinum dupliceergel
blauw extra harde en
herbruikbare dupliceergel
t.b.v. inbedmassa en
kunststof.

PLATINUM WASWALLEN

Platinum
waswallen zijn
verkrijgbaar in
rose(hard) en
rood (medium
hard). Ze zitten
per 100 st in
een doos



PLATINUM MODELLEERWAS

- Kwalitatief zeer hoogwaardig
elastische wax.
- Hoge rand- en breekstabiliteit
evenals extreem lage
thermische contractie.
- Het kan heel gemakkelijk
gemodelleerd en gesneden
worden
- Platen zijn 1,25 mm dik



PLATINUM PUTTY

PLATINUM PUTTY

- Perfecte compatibiliteit met koude en warme
uithardende kunststoffen.
- Hoge warmtebestendigheid zonder vervorming
- Hoge precisie in detaillering.
- Wit/blauw
- Verkrijgbaar in 2x2,5 kg



PLATINUM PUTTY FAST

- Zelfde kenmerken als Platinum putty
- Snellere verwerking
- Rose/blauw
- Verkrijgbaar in 2x5 kg



PLATINUM SOFT RELINE

PLATINUM SOFT RELINE is een lange termijn, zacht uitlijn materiaal
gebaseerd op additioneel uithardende vinyl siliconen in zelf-
mengende veiligheidspatronen. PLATINUM SOFT RELINE is geschikt
voor de toepassing op alle synthetische materialen gebaseerd
op polymethylmethacrylaat en voor een snelle en gemakkelijke
fabricatie van permanente zachte uitlijningen, zowel voor directe (in
de stoel) als indirecte (in het laboratorium) toepassingen.

PLATINUM SOFT RELINE geeft verlichting in drukgebieden in
de boven- en onderkaak. Het brengt een dam aan in geval van
bindingsproblemen en met 'flabby ridges'; het boven- en ondergebit
wordt steviger vastgezet door versterkte binding. Scherpgerande
alveolar processen worden elastisch bedekt.

PLATINUM SOFT RELINE is ook geschikt voor het bedekken van
implantaten en als overdentures gedurende het genezingsproces.



PLATINUM SOFT
RELIN PRIMER



PLATINUM
SOFT RELINE

AFDRUKBENODIGDHEDEN

Platinum mengpistool waarop
de Platinum mengtips passen.
De kleur die het dopje op de cartridge
heeft, is het advies voor de kleur van
de mengtip. De Platinum mengtips zijn
verkrijgbaar in de kleuren groen, rose,
geel en blauw.

De Platinum mengdoppen zijn geschikt
voor alle merken mengmachines.



PLATINUM
MENGDOPPEN



PLATINUM
MENGTIPT



PLATINUM
MENGPISTOOL



PLATINUM HUISMERK VAN DENTAL TECNO BENELUX BV



**PLATINUM ONS HUISMERK KENMERKT ZICH DOOR
HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR EEN HUISMERKPRIJS**

PLATINUM MONO PERFECT

Platinum mono perfect is een sterk hydrofiel Een-Fase afdrukmetaal voor kronen, bruggen, inlays, gedeeltelijke of complete prothesen en gebitsreparaties. Het kan ook gebruikt worden als afdrukmetaal voor relining, functionele afdrukken en afdrukken voor prothetische restauraties.

Platinum mono perfect is een medium visceus, thixotroop en hydrofiel precisie afdrukmetaal gebaseerd op extra hardende vinyl siliconen. De mengverhouding is 5 volumes basis op 1 volume activator. Het metaal heeft sterk hydrofiel eigenschappen en is bruikbaar op vochtige oppervlaktes. Hierdoor verbetert het de precisie afdruk en geeft dit een exacte kopie van de subgingivale gebieden.

Platinum mono perfect wordt geleverd in 390 ml MAXIMIX-patronen. De patronen zijn geschikt voor alle commercieel beschikbare mixmachines.

Kleur: magento
Verwerkingstijd: 1:30 minuten (*verwerkingstijd bij 23°C of 74°F*)
Intra orale tijd: 2 minuten
Eindshore: 65

PLATINUM MONO PERFECT SOFT

Platinum mono perfect soft is een sterk hydrofiel Een-Fase afdrukmetaal voor kronen, bruggen, inlays, gedeeltelijke of complete prothesen en gebitsreparaties. Het kan ook gebruikt worden als afdrukmetaal voor relining, functionele afdrukken en afdrukken voor prothetische restauraties.

Platinum mono perfect soft is een medium visceus, thixotroop en hydrofiel precisie afdrukmetaal gebaseerd op extra hardende vinyl siliconen. De mengverhouding is 5 volumes basis op 1 volume activator. Het metaal heeft sterk hydrofiel eigenschappen en is bruikbaar op vochtige oppervlaktes. Hierdoor verbetert het de precisie afdruk en geeft dit een exacte kopie van de subgingivale gebieden.

Platinum mono perfect soft wordt geleverd in 390 ml MAXIMIX-patronen. De patronen zijn geschikt voor alle commercieel beschikbare mixmachines.

Kleur: paars
Verwerkingstijd: 1:30 minuten (*verwerkingstijd bij 23°C of 74°F*)
Intra orale tijd: 2 minuten
Eindshore: 60

PLATINUM HEAVY BODY

Platinum Heavy body is een sterk hydrofiel visceus basis afdrukmetaal, dat bestaat uit extra hardende vinyl siliconen. De mengverhouding is 5 volumes basis op 1 volume activator. Samen met Platinum Double quick light cartridge is dit de ideale basis voor de twee fasen (een stappen) afdructechniek.

Platinum Heavy body wordt geleverd in 390 ml cardrigde. De patronen zijn geschikt voor alle commercieel beschikbare mix machines.

Platinum Heavy body bezit sterke hydrofiel eigenschappen en is geschikt op vochtige oppervlakten. Hierdoor verbetert het de precisie afdruk en geeft dit een exacte kopie van de subgingivale gebieden.

Kleur: groen
Verwerkingstijd: 2 minuten (*verwerkingstijd bij 23°C of 74°F*)
Intra orale tijd: 3 minuten

PLATINUM AFDRUK CARTRIDGES

PLATINUM BITE



Kleur

Rose

Intra-orale tijd

45 sec.

TOEPASSING

Platinum bite is een extreem hard en snel bindend beetafdruk metaal voor een snelle en nauwkeurige beetafdruk. Door de levering in patronen kan Platinum bite direct en zonder luchtbelletjes op de tand aangebracht worden. Het beetafdruk metaal is gebaseerd op toegevoegde doorweven vinylsiliconen.

Platinum bite kan gebruikt worden voor centriscie occlusies. Het kan ook gebruikt worden als sleutelmateriaal, bv. voor intraorale stift-afdrukken. Tenslotte kan het gebruikt worden voor de beetvortekniek. Door zijn extreem hoge uiteindelijke hardheid kan Platinum bite goed gefreesd worden.

Dankzij zijn thixotropische eigenschappen stroomt Platinum bite niet in interdentalen ruimten. Hierdoor kan Platinum bite zeer gemakkelijk gebruikt worden.

PLATINUM IMPLANTO 80



Kleur

Paars

Intra-orale tijd


± 3 min

TOEPASSING

S spuitbaar afdruk metaal voor implantaten in een edentate kaak
Platinum implanto 80 is een speciaal ontwikkelt automix afdrukmetaal voor de implantologie met een zeer hoge shore A hardheid met een stugge viscositeit op basis van additie vinyl siliconen.

Platinum implanto 80 heeft zeer hydrofiel eigenschappen en is bruikbaar op vochtige oppervlaktes.

PLATINUM MONO ACTIVE

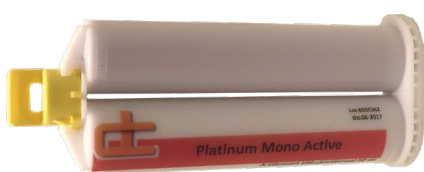

Kleur

Rood

Intra-orale tijd

2 min

TOEPASSING

Platinum mono active is een zeer hydrofiel en snel uithardend één-fase afdrukmetaal voor gedeeltelijke of volledige afdrukken, voor kronen, bruggen, inlays, deel- en totaalprothesen. Verder dient het als afdrukmetaal voor onderlaagafdrukken, functionele afdrukken, afdrukken voor prothesereparaties en voor de koper-ring-techniek.

PLATINUM FIT CHECK



Kleur

Wit

Intra-orale tijd

1,5 min

TOEPASSING

Platinum fit check is het meest geschikte metaal voor het opsporen van afwijkingen in de pasvorm van prothesen. Handelingen kunnen snel, gemakkelijk en netjes worden uitgevoerd. Voor het controleren van de pasvorm van:

Kronen:	randen approximale en occlusale vlakken
Gegotenkappen:	pasvorm kap
Inlays:	randen,approximale vlakken
Prothesen:	mucosale vlakken

PLATINUM LIGHT QUICK



Kleur

Geel

Intra-orale tijd

2 min

TOEPASSING

Sterk hydrofiel correctieafdrukmetaal voor de (twee fasen) dubbele afdructechniek

Platinum double quick en X-quick light is een sterk hydrofiel correctie afdrukmetaal voor de (twee fasen) dubbele afdructechniek in combinatie met alle Platinum afdrukmaterialen.

PLATINUM LIGHT X-QUICK



Kleur

Rose

Intra-orale tijd

± 1 min

PLATINUM MEDIUM QUICK



Kleur

Okergeel

Intra-orale tijd

2 min

TOEPASSING

Platinum double medium quick en X-quick is zeer veelzijdig. Het kan gebruikt worden:

- als een hydrofiel metaal voor de (een-staps) Twee-Fase afdructechniek.
- als correctiemetaal in de (tweestaps) putty/was techniek.
- Als een één fase afdrukmetaal voor kronen, bruggen, inlays, gedeeltelijke of complete prothesen en gebitsreparaties.
- Het kan ook gebruikt worden als afdrukmetaal voor relining, functionele afdrukken en afdrukken voor prothetische restauraties.

PLATINUM MEDIUM X-QUICK



Kleur

Wijnrood

Intra-orale tijd

± 1 min

PLATINUM HEAVY QUICK



Kleur

Blauw

Intra-orale tijd

2 min


TOEPASSING

Super hydrofiel hoog visceus basis afdrukmetaal

Platinum double heavy quick en x-quick een super hydrofiel, hoog visceus basis afdrukmetaal dat bestaat uit extra hardende vinyl siliconen.

Platinum double heavy quick en x-quick kan in combinatie met het super hydrofiel correctie afdrukmetaal, Platinum double quick light of X-quick, dienen als de ideale basis voor de twee fasen dubbele afdructechniek.

PLATINUM HEAVY X-QUICK

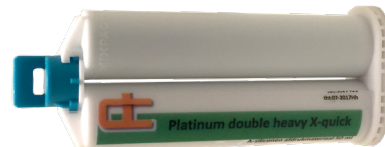

Kleur

Groen

Intra-orale tijd

± 1 min