

 **NIEUW!**

myerson®

PERMA^{SOFT}® denture liner

PermaSoft is van hoge kwaliteit en zeer geschikt voor gebruik aan de stoel of in het laboratorium.

TOEPASSINGEN EN VOORDELEN:

- Blijft zacht voor zeker 18 maanden en langer
- Relining volledige en gedeeltelijke prothesen, implantaat overkappingsprothesen en revisies aan de stoel
- Ook verkrijgbaar in clear voor het relinen van nachtsplinten, bijtplaten en spalken of als pakkingsconnector rondom tanden
- Unieke sealer is bestand tegen vlekken en verharding
- Eenvoudige procedure aan de stoel en in het laboratorium.
- Geen methylmethacrylaat, sterke binding aan acryl en hecht opnieuw aan zichzelf



we keep you smiling 
dental tecno benelux

WWW.DENTALTECNO.NL

INFO@DENTALTECNO.NL


0318 769072

ZES EENVOUDIGE STAPPEN NAAR PATIËNTCOMFORT

De techniek aan de stoel is hieronder afgebeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen voor implantaalprothesen en laboratoriumtechnieken.




1 Mix poeder en vloeistof volgens de richtlijnen. Roer voorzichtig.

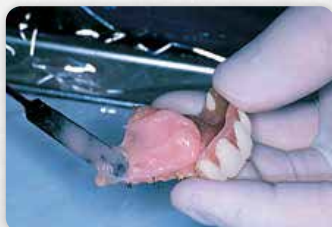

2 Breng het mengsel aan op de droge prothese.



3 Breng de prothese in en verwijder na 1 minuut.

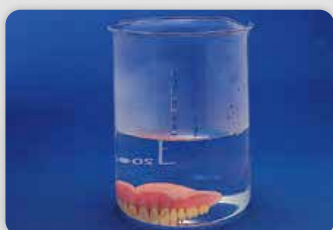

4 Leg het 10 minuten in heet water.



5 Koel af met koud water. Klaar om af te werken.



6 Breng de sealer op droge prothese aan en laat voor 2 minuten drogen.

**HARD OF ZACHT...
U KUNT HET ZELF BEPALEN**

Beschrijving	Kleur	Relines per kit +/-
60gr. Kit	Roze	12
60gr. Kit	Helder	12

Dichtheid	Verhouding (P:V)	Poeder	Vloeistof	Toepassingen
Meest zacht	2 : 1	8cc	4cc	- Postoperatieve prothesen. - Beschermende laag voor gevoelig weefsel.
Standaard	2,5 : 1	10cc	4cc	- Relining van volledige prothesen. - Gedeeltelijke tand stabilisatie. - Overkappingsprothese ondersteund door genezingskapjes.
Stevig	3 : 1	12cc	4cc	Overkappingsprothese verankerd met drukknoppen, stegverbindingen of tanden.